
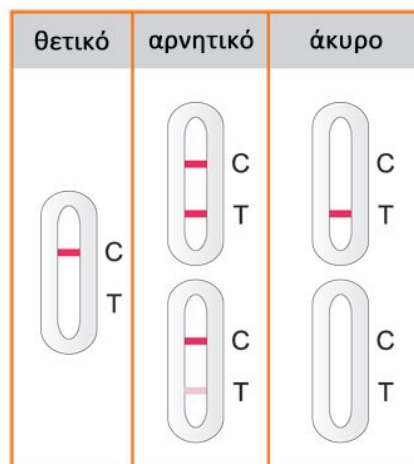


**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ:** Το Dima DRUG TEST Ούρων είναι ένας εύκολος, γρήγορος, ποιοτικός και οπτικά αναγνώσιμος τρόπος ελέγχου στα ανθρώπινα ούρα, που χρησιμοποιεί μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας δίνοντας αποτέλεσμα σε 5 λεπτά. Η μέθοδος επιστρατεύει ένα μοναδικό μίγμα μονοκλωνικών και πολυκλωνικών αντισωμάτων ώστε να αναγνωρίσει επιλεκτικά το(α) ναρκωτικό(α) κατάχρησης και τους μεταβολίτες του στα δείγματα που χρησιμοποιούνται με μεγάλο βαθμό ευαισθησίας. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών παραμένει ένα αυξανόμενο κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα σε πολλά ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη σε όλο τον κόσμο. Οι αναφερθείσες ναρκωτικές ουσίες είναι ανάμεσα στις πιο συχνά καταναλισκόμενες παράνομες ουσίες σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Ουσιών Κατάχρησης και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πάρτε δείγμα ούρων από το άτομο σε ένα ουροσυλλέκτη (κατά προτίμηση τα πρωινά ούρα).
2. Αφήστε τα ούρα να κρυώσουν (να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου).
3. Αφαιρέστε το τεστ χρήσης ναρκωτικών από τη συσκευασία του (να είναι και αυτό σε θερμοκρασία δωματίου πριν το ανοίξετε).
4. Αφαιρέστε το καπάκι από το τεστ χρήσης (αφορά την κασέτα βύθισης μόνο και όχι την καρτολίνα).
5. Βυθίστε το τεστ μέσα στα ούρα (στην καρτολίνα τα ούρα να μην ξεπεράσουν τη γραμμή MAX - στην κασέτα τα ούρα να μην αγγίξουν το πλαστικό της) για 15 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
6. Αφαιρέστε το τεστ από τα ούρα και ακουμπήστε το σε μία μη απορροφητική επιφάνεια (στην περίπτωση της κασέτας επανατοποθετείτε το καπάκι της).
7. Διαβάστε τα αποτελέσματα μετά από 5 λεπτά και πριν από τα 10 λεπτά. Ακολουθώς βλέπετε τις πιθανές ενδείξεις που μπορεί να εμφανιστούν στην κάρτα αποτελεσμάτων του τεστ (Επίσης αναγράφονται και επάνω στην κασέτα).

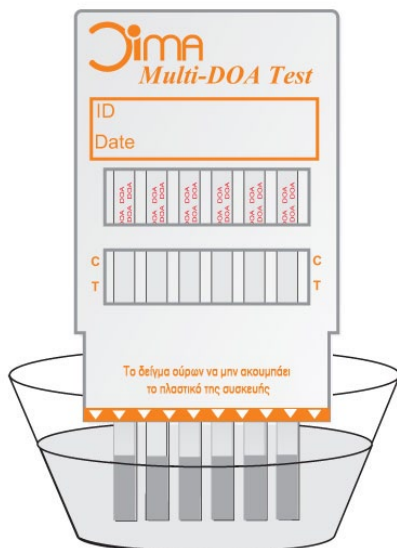

**ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΑ.**

Συνομογραφία	Πλήρης Ονομασία	Άλλες ονομασίες	Χρόνος ανίχνευσης στα ούρα μετά τη χρήση
AMP	Αμφεταμίνες	Speed, amph or whizz.	2-6 ημέρες
BAR	Βαρβιτουρικά	Depressants, Barbs, Downers	3-8 ημέρες
BUP	Βουπρενορφίνη	Subutex	3-6 ημέρες
BZO	Βενζοδιαζεπίνες	Benzos, Rohypnol ή roofies	2-14 ημέρες
COC	Κοκαΐνη	Coke, crack or charlie.	2-5 ημέρες
MDMA	Μεθυλενοδιοξυμεθαμφεταμίνες	Εκσταση ή E	2-6 ημέρες
MET	Μεθαμφεταμίνες	Glass, ice or meth.	2-6 ημέρες
MOP	Μορφίνη		2-5 ημέρες
MTD	Μεθαδόνη	Dolly, Red Rock	2-8 ημέρες
OPI	Οπιούχα	Ηρωίνη	2-5 ημέρες
PCP	Φαινκυκλιδίνη	Angel dust ή Χάπι ειρήνης	3-8 ημέρες
TCA	Τρικυκλικά Αντικαταθλιπτικά	TCA	6-10 ημέρες
THC	Μαριουάνα	Χασίς, Κάνναβη, Μαύρο, Φούντα	Περιστασιακή χρήση 2-14 ημέρες, συχνή χρήση μέχρι 30 ημέρες